

**IMMAX**

imagenología maxilofacial

*Guía de usuario*



# Guía 1



## *Windows/MAC*



1-Inserte el disco

2-Inicio automático o entrar a “Equipo” y en el apartado de “dispositivos y unidades” dar doble clic al icono Planmeca Romexis Viewer.

a. Si es usuario MAC el estudio se abrirá a través del menú del disco, y dando doble clic al icono Planmeca Romexis Viewer.

b. Si el disco le pide “ejecutar como administrador” , dar clic derecho sobre el icono de Romexis e iniciar como administrador



3-Se abrirá una nueva ventana con el nombre del paciente el cual deberá ser seleccionado para posteriormente dar clic en “iniciar visualizador desde el CD” o “copiar el visualizador e iniciar”, si usted desea mantener guardado el estudio en su computadora.

**PLANMECA** Planmeca Romexis Viewer

Imágenes de ejemplo Guía de usuario Información de producto español

Selecciona imágenes para ver

Seleccionar todo

Utilizar CTRL y Mayusculas para seleccionar varias imágenes

INICIAR visualizador desde el CD

COPIAR visualizador e iniciar

www.planmeca.com v. 3.8.0



4-A continuación aparecerá “Cargando...” el estudio.




Cargando...

v. 3.8.0




5-Después observará una ventana que dice “Por favor, espere” SIN dar clic en aceptar, ya que la ventana desaparecerá.

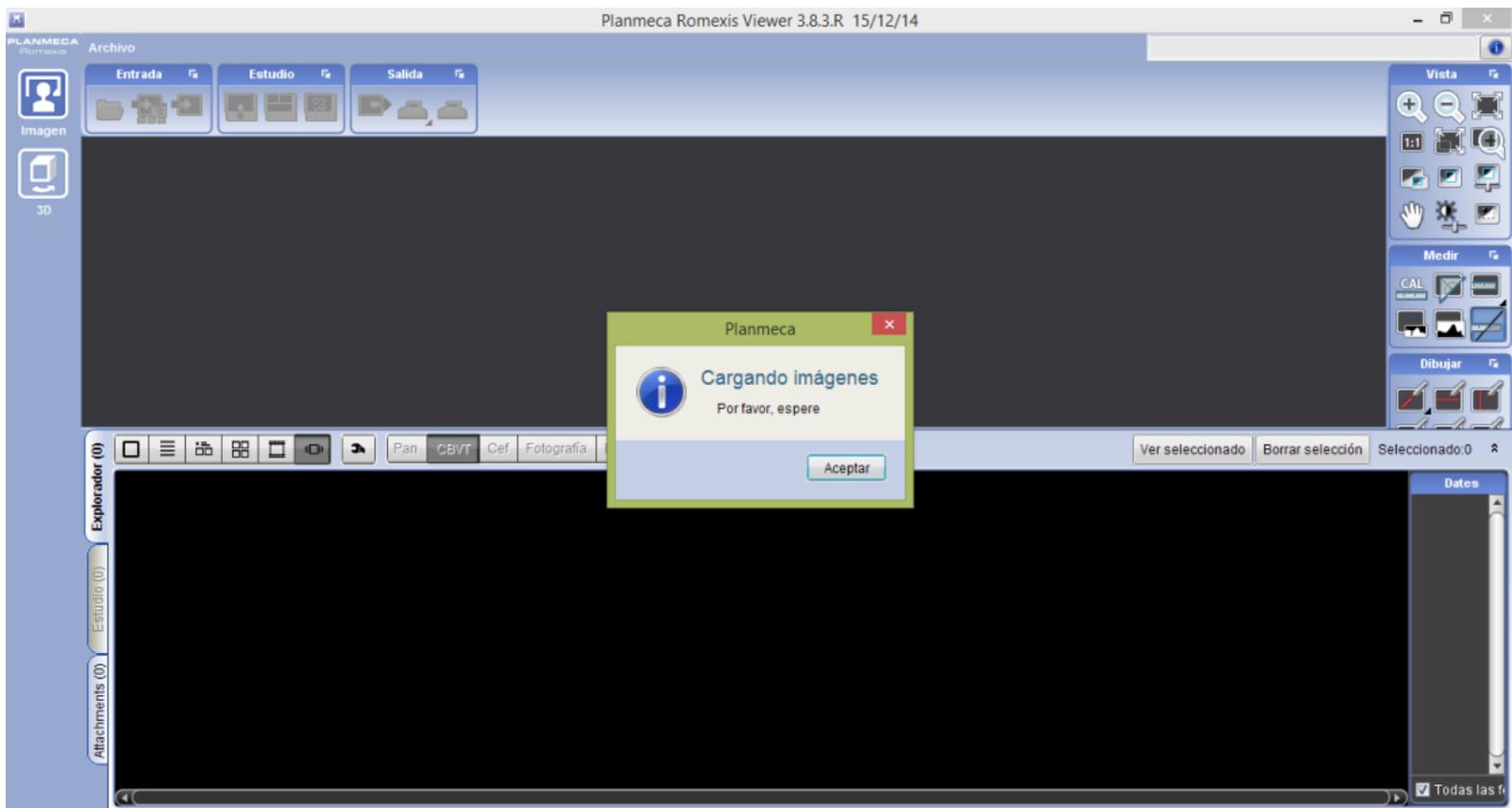



6-Se cargarán las imágenes e iniciará automáticamente en el explorador.

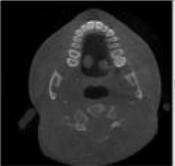Fecha de exposición	Tamaño de Imagen	Tamaño vóxel (µm)	Número de serie	kV	mA	s	DAP(mGy*cm²)	Observaciones	Previsualización
27/05/15 06:02 PM	450 × 450 × 255	400	TFMP10134	90	8	13.485	996.3		

Planmeca


**Progreso...**

Leyendo imagen 3D del servidor  
Renderizando imagen

Cancelar



7-El estudio está listo para utilizar sus herramientas.

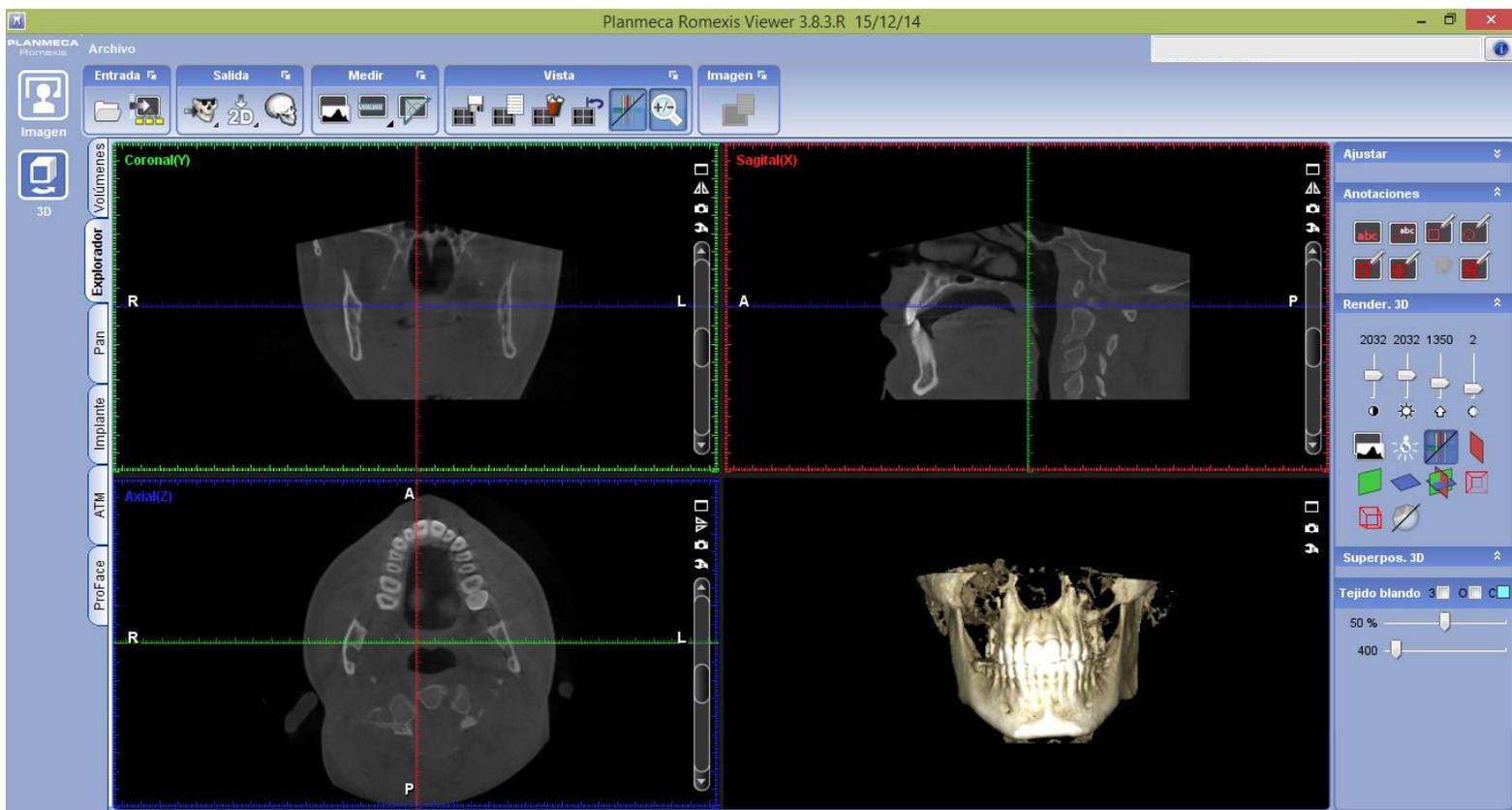

8-Cualquier duda en su visualización favor de reportarse en IMMAX al teléfono: (81) 1969-0957 o 58

# Guía 2



## *Como instalar Romexis en su computadora*


1. Introducir CD

2. Abrir archivos de CD

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 images	31/03/2014 10:36 a...	Carpeta de archivos	
 Java_1.6_For_OSX	31/03/2014 10:36 a...	Carpeta de archivos	
 PDF	31/03/2014 10:36 a...	Carpeta de archivos	
 planmeca_romexis_viewer	31/03/2014 10:37 a...	Carpeta de archivos	
 Romexis_Viewer.app	31/03/2014 10:37 a...	Carpeta de archivos	
 Xtras	31/03/2014 10:37 a...	Carpeta de archivos	
 autorun	31/03/2014 11:22 a...	Información sobre...	1 KB
 config	31/03/2014 11:22 a...	Opciones de confi...	1 KB
 Romexis_Viewer	31/03/2014 11:22 a...	Imagen de mapa ...	1,876 KB
 Romexis_Viewer	31/03/2014 11:22 a...	Aplicación	400 KB



3. Copiar todos los archivos del CD en “escritorio” dentro de una carpeta
4. Crear acceso directo de “Imágenes” y “Romexis\_Viewer”

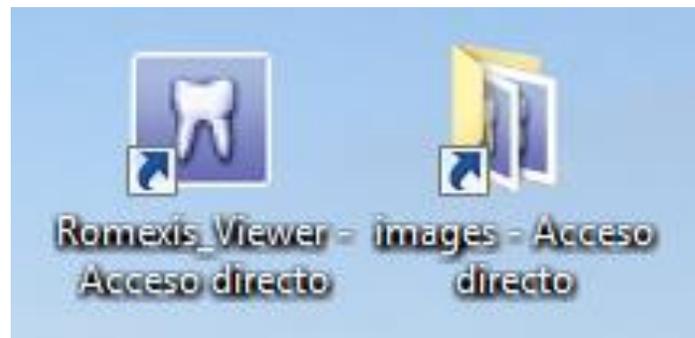

5. Cualquier duda favor de reportarse en IMMAX al teléfono: (81) 1969-0957 o 58

## Guía 3



***Guía para utiliza el Dropbox (recibirá el estudio solicitado después de haber sido tomado a su paciente)***

1-Recibirá un correo de IMMAX con un link o enlace del estudio, al dar clic lo llevará a una ventana nuevamente donde aparecerá el estudio de su paciente en formato DICOM (.dcm) después dar clic en “descargar”, enseguida el estudio aparecerá cargando en la parte inferior de su computadora.



**Imagenologia Maxilofacial** <immaxmty@gmail.com>



<https://www.dropbox.com/s/jvx99mrxapzndft/>




.dcm

Hace 4 días · 174,18 MB

Descargar

Guardar en mi Dropbox

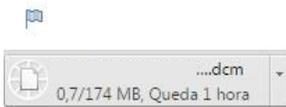

2-Al completar la descarga, el archivo lo puede encontrar en la carpeta de “Descargas” de su computadora (regresar a guía 2)

3-Guardar archivo en la carpeta de “Acceso directo Imágenes”

4-Dar clic “Acceso directo Romexis”

5-Cualquier duda favor de reportarse en IMMAX al teléfono: (81) 1969-0957 o 58

Nota. En la carpeta imágenes es donde se guarda los archivos DICOM de todos los pacientes